


KARTA INFORMACYJNA - MASKA MEDYCZNA TRÓJWARSTWOWA JEDNORAZOWA

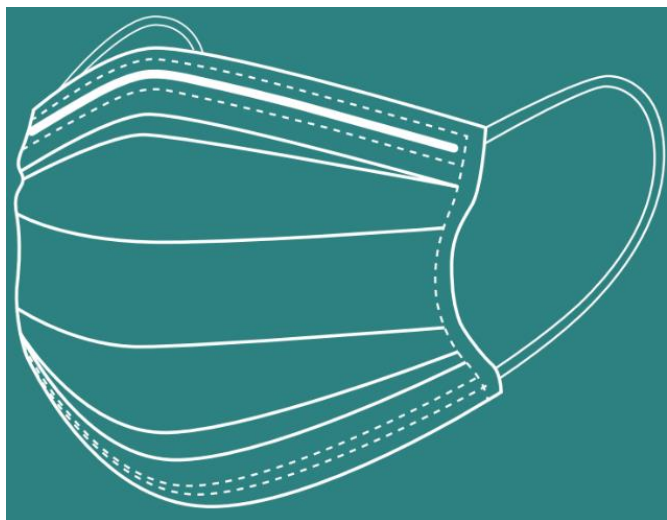

WŁAŚCIWOŚCI

- Maska jednorazowego zastosowania, niejałowa
- Wyrób posiada Świadectwo Jakości Zdrowotnej NIZP-PZH B-BŻ-6071-0123/20/C ważne do 23.04.2023
- Wykonana z trzech warstw włókniny polipropylenowej – dwóch posiadających Świadectwo Jakości Zdrowotnej NIZP-PZH oraz certyfikat OEKO TEX Standard 100 i jednej o potwierdzonej badaniami skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE) na poziomie wynoszącym minimum 95%
- Skład : 100% polipropylen
- Rozmiar uniwersalny, wymiary $\approx 17,5$ cm x 9 cm
- Kolor maski - biały
- Zakładana za uszy za pomocą gumek
- Możliwość indywidualnej regulacji do kształtu nosa za pomocą wszytego wewnątrz drucika
- Umożliwia zachowanie swobody oddychania

OPIS WYROBU:

Głównym przeznaczeniem maski jest ochrona górnych dróg oddechowych przed czynnikami zakaźnymi, przenoszonymi drogą kropelkową. Stosowanie maski służy powstrzymaniu noszącej ją osoby przed rozprzestrzenianiem wirusów i bakterii podczas mówienia, kichania lub kaszlu. Ideą maski jest prewencja przed dalszą emisją zakażenia. Włóknina filtrująca, znajdująca się wewnątrz maski zapewnia skuteczność filtracji, jednocześnie pozwalając na swobodne oddychanie i komfort użytkowania.

Maska została zaprojektowana w taki sposób, aby ściśle przylegała do twarzy noszącej ją osoby, dokładnie zasłaniając nos i usta. Jej konstrukcja pozwala na dopasowanie do kształtu twarzy. Przy prawidłowym założeniu maska nie powinna odstawać po bokach ani w obszarze brody. Zastosowanie drucika o długości 14,5 cm zapewnia prawidłowe dopasowanie maski do kształtu twarzy, co wpływa na ograniczenie parowania okularów. Maskę wyposażono w zakładane za uszy gumki, które zapewniają optymalny stopień przylegania maski do twarzy.

Maseczka nadaje się do jednokrotnego użytku, dzięki czemu stanowi jedną z najprostszych i najbardziej higienicznych metod zapobiegania zakażeniom przenoszonym drogą kropelkową. Wyrób nie jest produktem jałowym.

Producent:

PROTEKTOR Spółka Akcyjna, ul. Vetterów 24A-24B, 20-277 Lublin

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA:

1. Rozpakuj масечkę.
2. Chwyć za gumki znajdujące się po bokach, tak, aby usztywnienie znajdowało się na górze
3. Załóż масечkę, a następnie rozciągnij ją w pionie tak, aby dokładnie zakryć usta i nos.
4. Dopasuj usztywnienie do kształtu nosa.

OPIS ZASTOSOWANYCH MATERIAŁÓW:

Wyrób składa się z trzech warstw materiału - włókniny polipropylenowej. Warstwa umiejscowiona wewnątrz maski (PP Meltblown) posiada potwierdzoną badaniami skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE) na poziomie wynoszącym minimum 95%. Warstwy zewnętrzne (PP Spunbond 15g oraz 20g) są zgodne z wymogami certyfikatu OEKO-TEX Standard 100 i posiadają Świadectwo Jakości Zdrowotnej wydane przez Państwowy Zakład Higieny – Zakład Bezpieczeństwa Żywności.

Wykaz użytych w wyrobie materiałów:

ZASTOSOWANIE	PARAMETRY	CERTYFIKATY /ATESTY
Warstwa zewnętrzna wierzch	Skład: 100% polipropylen, belka o średnicy od 430 mm do 470 mm i nawoju ok. 1900 mb	• Świadectwo Jakości Zdrowotnej H-HŻ-6071-0191/17/C wydane przez Zakład Bezpieczeństwa Żywności PZH • OEKO-TEX Standard 100
Warstwa wewnętrzna	Skład: 100% polipropylen, belka o średnicy od 560 mm do 600 mm i nawoju ok. 1900 mb	• Badanie skuteczności filtracji bakteryjnej przeprowadzone przez instytut <i>Centexbel textile competence center</i>
Warstwa wewnętrzna spód	Skład: 100% polipropylen, belka o średnicy od 490 mm do 530 mm i nawoju ok. 1900 mb	• Świadectwo Jakości Zdrowotnej H-HŻ-6071-0191/17/C wydane przez Zakład Bezpieczeństwa Żywności PZH • OEKO-TEX Standard 100
Gumki do zakładania масечки za uszy	Skład: 75% poliester 25% elastamer, średnica ok. 3mm,	• OEKO-TEX Standard 100
Drucik do regulacji maski w obszarze nosa	Surowiec : walcówka 5,5 SAE 1006	

CERTYFIKATY:

Maska posiada Świadectwo Jakości Zdrowotnej NIZP-PZH B-BŻ-6071-0123/20/C ważne do 23.04.2023. Oznacza to, że o ile używana zgodnie z przeznaczeniem, jest bezpieczna dla zdrowia ludzi i przyjazna dla środowiska.

Włóknina polipropylenowa stanowiąca zewnętrzne warstwy maski jest atestowana przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, jako nie stanowiący zagrożenia dla zdrowia człowieka. Dodatkowo jego zgodność z humanoekologicznymi wymaganiami potwierdza certyfikat OEKO-TEX Standard 100.

Warstwa wewnętrzna – filtrująca posiada badanie potwierdzające wysoką skuteczność filtracji bakteryjnej przeprowadzone przez instytut Centexbel Textile Competence Center.

Producent:

PROTEKTOR Spółka Akcyjna, ul. Vetterów 24A-24B, 20-277 Lublin